

## COMBIEN DE TEMPS MES DENTS RESTERONT-ELLES BLANCHES?

Votre mode de vie est le facteur qui influe le plus sur votre santé bucco-dentaire. Si vous êtes un grand buveur de café, de vin ou de soda, le blanchiment de vos dents diminuera plus rapidement que pour une personne qui préfère boire de l'eau. En général, votre blanchiment sera optimal pendant les six premiers mois, avant de diminuer lentement.

## LE BLANCHIMENT POLA EST-IL SANS DANGER?

Des études cliniques ont montré que le blanchiment des dents au peroxyde de carbamide ou au peroxyde d'hydrogène est sans danger s'il est effectué sous la direction et la supervision d'un dentiste qualifié. Nos scientifiques Pola ont contribué à améliorer la couleur des dents depuis 50 ans et ont mis au point une formule de blanchiment des dents à la fine pointe de l'industrie, qui élimine les taches résistantes « incrustées », tout en restant totalement sans danger pour vos dents.

## QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE POLA ET LES TROUSSES DE BLANCHIMENT DES DENTS À DOMICILE VENDUES EN LIGNE?

Il existe de nombreuses marques et méthodes de blanchiment des dents en vente en ligne ou dans le commerce, disponibles sans ordonnance; cependant, toutes ne sont pas toujours fiables et sûres. Il est toujours important de consulter votre dentiste au préalable si vous souhaitez blanchir vos dents, car il sera à même d'évaluer la santé de vos dents et de décider si vous pouvez ou non les blanchir sans danger. Des études cliniques ont montré que le blanchiment au peroxyde de carbamide ou au peroxyde d'hydrogène, s'il est effectué correctement par un dentiste ou conformément à ses instructions, est sans danger pour les dents et les gencives.

**SDI** | YOUR SMILE. OUR VISION.

SDI (North America) Inc.  
1279 Hamilton Pkwy  
Itasca, IL 60143

É.-U. et CANADA 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**Communiquez avec nous! Faites-nous part de moments mémorables avec Pola Light! Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.**



INSTAGRAM  
@pola\_smile



FACEBOOK  
polasmiletoothwhitening

03-2023

M100516 B



+DO36M1005161.

# POLA LIGHT

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

## ARBORER UN SOURIRE PLUS ÉCLATANT ET PLUS CONFIANT EN 5 JOURS



FACILE À  
UTILISER



À PARTIR DE  
SEULEMENT 20  
MINUTES PAR JOUR



UTILISÉ ET  
RECOMMANDÉ PAR  
LES PROFESSIONNELS



DES DENTS PLUS  
BLANCHES EN CINQ  
JOURS

## SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS PROFESSIONNEL

Des millions de personnes dans 100 pays ont fait confiance à Pola pour obtenir rapidement et de façon sécuritaire un sourire plus blanc

Le système de blanchiment dentaire avancé Pola Light associe la formule de blanchiment éprouvée de Pola à une technologie DEL ciblée.

Et tout cela en restant confortablement chez vous.

- Une action rapide, pour des dents plus blanches en 5 jours
- Formulé pour éliminer en toute sécurité les taches incrustées
- Rend à votre sourire sa teinte naturelle la plus blanche possible
- Hydratation supplémentaire pour assurer un confort optimal du patient
- Une lumière DEL entièrement rechargeable pour vos futurs traitements de blanchiment des dents

### LES TROUSSES DE POLA LIGHT 9,5 % DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET 22 % DE PEROXYDE DE CARBAMIDE CONTIENNENT:

- 1 x embout buccal Pola DEL
- 4 x seringues de 3 g [0,1 once] de solution de blanchiment des dents Pola Day ou Pola Night
- 1 x cordon de chargement USB
- 1 x guide d'instructions

### POURQUOI CHOISIR POLA LIGHT:

- SDI contribue à améliorer la couleur des dents depuis 50 ans.
- Pola de SDI est une marque à laquelle les dentistes font entièrement confiance.
- Pola Light est un moyen efficace et sans danger de blanchir vos dents dans le confort de votre foyer au moment qui vous convient.



À PARTIR DE SEULEMENT 20 MINUTES PAR JOUR

2 traitements de 10 ou de 15 minutes par jour.



DES DENTS PLUS BLANCHES EN CINQ JOURS

Durée de traitement de 5 jours.

Nul besoin de passer du temps sur le fauteuil ou d'utiliser des gouttières sur mesure, ce qui fait gagner du temps au patient comme au dentiste.



FACILE À UTILISER

Portable, rechargeable et facile à porter sans cordon attaché à l'embout buccal.

L'embout buccal Pola DEL consiste en une double arcade et sa taille est universelle.



UTILISÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES PROFESSIONNELS

Pola est un système professionnel de blanchiment des dents auquel les dentistes font confiance et qu'ils recommandent pour obtenir rapidement et de façon sécuritaire un sourire plus blanc.

Les gels de blanchiment à viscosité élevée et à pH neutre assurent le plus grand confort du patient dans une trousse à emporter.

Le mélange unique d'agents apaisants, de revitalisants et une teneur en eau élevée pour assurer un confort maximal au patient.

## CERTAINES CHOSES IMPORTANTES À SAVOIR

### À QUOI EST DUE LA DÉCOLORATION DES DENTS?

Chaque personne a des dents uniques, c'est pourquoi ces dernières se décolorent et se tachent de différentes manières. La décoloration ou l'apparition de taches sur les dents d'une personne sont généralement causées par le café, le thé noir, la tisane, le vin rouge, les aliments épicés, comme le curry et le tabac.

### DE COMBIEN DE NUANCES MES DENTS VONT-ELLES BLANCHIR?

De nombreux fabricants de produits de blanchiment des dents revendiquent « 5 teintes » de blanc ou similaire. Cependant, cela peut être trompeur car cela dépend de la teinte d'origine de vos dents et de la coloration actuelle de vos dents. Pola est formulé pour éliminer les taches les plus tenaces de vos dents et leur redonner leur couleur naturelle la plus blanche.