



## JAK DLOUHO MÉ ZUBY ZŮSTANOU BÍLÉ?

Největší dopad na vaši ústní hygienu má váš životní styl. Pokud rádi pijete kávu, víno nebo limonády, vybělení zubů zmizí dříve než u osob, které preferují vodu. Vybělení zůstane nejúčinnější po dobu prvních 6 měsíců a potom se začne pomalu vytrácet.

## JE BĚLENÍ PRODUKTEM POLA BEZPEČNÉ?

Ano. Z klinických studií plyne, že bělení zubů karbamid-peroxidem nebo peroxidem vodíků je bezpečné, je-li prováděno pod vedením a dohledem školeného zubního lékaře. Díky 50-ti letým zkušenostem s vylepšováním ústní hygieny naši vědeckí pracovníci vyvinuli složení na bělení zubů, které zaujímá přední místo v odvětví a dokáže odstranit i ty nejobtížnější skvrny. A navíc je pro vaše zuby naprosto bezpečné.

## JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SADOU POLA A DOMÁCÍMI SADAMI NA BĚLENÍ, KTERÉ LZE ZAKOUPIT NA INTER-NETU?

Na internetu či v ochodech naleznete celou řadu značek a metod bělení zubů, nicméně nemusí být vždy spolehlivé a bezpečné. Pokud si chcete vybělit zuby, vždy je důležité nejprve se poradit se zubním lékařem. Ten vám pomůže zhodnotit zdraví vašich zubů a rozhodnout se, zda je bezpečné je bělit. Klinické studie prokázaly, že bělení karmamid-peroxidem nebo peroxidem vodíku, pokud je prováděno správně zubním lékařem nebo dle jeho pokynů, je pro zuby a dásně bezpečné.

# POLA LIGHT

POKROČILÝ SYSTÉM NA BĚLENÍ ZUBŮ

## UŽIJTE SI ZÁŘIVĚJŠÍ A SEBEVĚDOMĚJŠÍ ÚSMĚV BĚHEM 5-TI DNŮ



**SDI** | YOUR OUR  
SMILE. VISION.

SDI Limited  
3-15 Brunson Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia  
**AUSTRALIA** 1 800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 022 55 734  
**BRAZIL** 0800 770 1735

**FRANCE** 00800 022 55 734  
**GERMANY** 0800 100 5759  
**ITALY** 00800 0225 5734  
**SPAIN** 00800 022 55 734  
**UNITED KINGDOM** 00800 022 55 734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166

**Connect with us! Share your Pola Light moments!  
We look forward to hearing from you.**



INSTAGRAM  
@pola\_smile



FACEBOOK  
polasmiletoothwhitening

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)



+D036M100531 Y



SNADNÉ  
POUŽITÍ



STAČÍ POUŽÍCH  
20 MINUT DENNE



POUŽÍVÁNO A  
DOPORUČENO  
ODBOBNÍKY



BĚLEJŠÍ ZUBY  
BĚHEM PĚTI DNŮ



# MILIONY LIDÍ VE VÍCE NEŽ 100 ZEMÍCH DŮVĚŘUJÍ ZNAČCE POLA, CHTĚJÍ-LI BEZPEČNĚ A RYCHLE DOSÁHNOUT BĚLEJŠÍ-HO ÚSMĚVU.

Pokročilý systém na bělení zubů Pola Light je spojením oceněného bělicího složení a cilené LED technologie.

A to vše z pohodlí domova.

- Rychle působí a vybělí zuby během 5-ti dnů
- Bezpečně odstraní dlouhodobé skvrny
- Extra hydratace, aby se minimalizovala přecitlivělost
- Remineralizace na posílení zubů
- Dobíjecí led světlo pro další bělení zubů

## SADA POLA LIGHT S 6% PEROXIDEM VODÍKU OBSAHUJE:

- 1x náustek Pola LED
- 4x stříkačka na bělení zubů s gelem Pola Day 3g
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x návod k použití

## PROČ SI VYBRAT POLA LIGHT:

- Společnost sdi se stará a vylepšuje chrup už 50 let
- Značka Pola společnosti sdi důvěřují zubní lékaři z celého světa
- Pola Light je efektivní a bezpečný způsob bělení zubů z pohodlí domova a v čase, který vám vyhovuje



STAČÍ POUHÝCH  
20 MINUT DENNĚ

Ošetření o délce 2 ×10 nebo  
2 × 15 minut za den.



BĚLEJŠÍ ZUBY  
BEHEM PĚTI DNŮ

Doba používání je 5 dnů.

Nemusíte docházet do ordinace ani  
používat na míru šité nástavce.  
Ušetříte čas sobě i zubnímu lékaři.



SNADNÉ POUŽITÍ

Přenosné, dobíjitelné a snadno použitelné  
- k náustku není připevněna žádný kabel.  
Náustek Pola LED má dvojitou klenbu a  
univerzální velikost.



POUŽÍVÁNO A  
DOPORUČENO  
ODBORNÍKY

Pola je profesionální systém na bělení  
zubů, které-mu důvěřují a doporučují jej  
zubní lékaři z celého světa. Dosáhnete s  
ním bezpečně a rychle bělejší-ho úsměvu.

Bělicí gely o vysoké viskozitě a s  
neutrálním pH za-jišťují maximální pohodlí  
pacienta, který sadu používá z pohodlí  
domova.

Unikátní směs uklidňujících prvků a  
vysokého obsa-hu vody snižuje citlivost.

## KLÍČOVÉ INFORMACE

### CO ZPŮSOBUJE ZBARVENÍ CHRUPU?

Každý chrup je jedinečný, a proto se zbarvuje a vznikají na něm skvrny jinými způsoby. Zbarvení či vznik skvrn na zubech je obvykle způsobeno kávou, černými čaji, bylinnými čaji, červeným vínem, páli-vým jídlem, jako je kari, a kouřením cigaret.

### O KOLIK BĚLEJŠÍ MĚ ZUBY BUDOU?

Mnoho výrobců bělicích přípravků na zuby láká na vybělení o „5 odstínů“ či podobně. To však může být zavádějící, jelikož to záleží na původním odstínu chrupu a aktuálních skvrnách. Bělicí systém Pola odstraňuje ty nejobtížnější skvrny a zubům navrácí přirozenou bílou barvu.