

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## INSTRUCTIONS POST OPERATOIRES : TRAITEMENT D'ÉCLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL AVEC POLA



- Respectez les consignes fournies par votre chirurgien-dentiste.
- Si vous êtes fumeur(se), abstenez-vous de fumer pendant 48 heures
- Évitez de consommer des aliments très colorés (sauces rouges, myrtilles etc...) ainsi que des boissons telles que thé ou café pendant 48 heures.
- Il est possible que vous ressentiez une légère sensibilité en buvant des liquides froids ou chauds. Cette sensibilité disparaît généralement en 1 à 2 jours. Si elle persiste consultez votre dentiste.
- En cas de sensibilité des gencives, évitez la zone sensible en vous brossant les dents.
- L'effet immédiat de l'éclaircissement dentaire peut être spectaculaire du fait d'une légère déshydratation des dents traitées. Il est normal que cet effet s'estompe légèrement et en se réhydratant vos dents retrouveront une teinte blanche plus naturelle.
- Les résultats à long terme varient d'un patient à l'autre. Ils dépendent de la teinte originale de vos dents et de vos habitudes de vie, comme par exemple le tabagisme ou la consommation de boissons colorées (vin rouge, café, thé, etc...)
- Nous recommandons des séances d'entretien tous les 6 ou 12 mois afin de conserver la teinte obtenue. Votre dentiste se fera un plaisir de vous informer sur les différentes options disponibles telles que Pola Day, Pola Night, Pola Light ou Pola Luminare.
- Nous recommandons des séances d'entretien tous les 6 ou 12 mois afin de conserver la teinte obtenue. Votre dentiste se fera un plaisir de vous informer sur les différentes options disponibles telles que Pola Day, Pola Night, Pola Office ou Pola Office+.
- Le traitement n'éclaircira pas les obturations, couronnes ou restaurations collées existantes. Il sera donc peut-être nécessaire de les remplacer pour qu'elles s'accordent avec la teinte de votre nouveau sourire.
- Si votre famille ou vos amis vous font des compliments sur votre nouveau sourire, n'oubliez pas de leur dire que Pola pourrait éclaircir leur sourire aussi.



SCANNEZ LE QR CODE POUR  
OBTENIR PLUS  
D'INFORMATIONS SUR LES  
PRODUITS POLA.

### CLAUDE DE NON RESPONSABILITÉ

Les données contenues dans ce fichier sont présentées uniquement à des fins d'information. Il s'agit de recommandations destinées aux patients à la suite d'un éclaircissement dentaire professionnel réalisé au cabinet dentaire. Nous déclinons toute responsabilité implicite et ne garantissons pas la précision et l'exhaustivité des informations fournies.

Vous assumez l'entière responsabilité de l'utilisation des informations contenues dans cette page et vous déclarez que SDI Limited et/ou ses filiales ne sauraient être tenues pour responsables en cas de réclamation ou dommage découlant de leur utilisation.

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) | [polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)